

ALOCLAIR® PLUS SPRAY - FOLHETO INFORMATIVO

ALOCLAIR® PLUS

Spray

Alívio rápido da dor e cicatrização das aftas

Aloclair® Plus Spray forma uma película protectora que adere à cavidade oral como uma barreira mecânica que cobre as zonas afectadas, aliviando a dor causada pela exposição das terminações nervosas.

Aloclair® Plus Spray favorece o processo de cicatrização e contribui para o alívio da dor causada por pequenas lesões na boca tais como estomatites aftosas, úlceras aftosas e pequenas lesões causadas por aparelhos de ortodôncia ou próteses dentárias. Está também indicado para úlceras aftosas difusas. O Ácido Hialurónico e o Aloé Vera presentes na formulação favorecem o processo natural de cicatrização.

Modo de Utilização: Quando utilizar o produto pela primeira vez, retire a tampa e coloque o pulverizador. Direcione o pulverizador para as lesões dentro da boca e pulverize três vezes ou as necessárias para cobrir a zona afectada. O pulverizador permite a cobertura das lesões com máxima eficácia. Aloclair® Plus Spray é inócuo se ingerido.

Composição: água, propilenoglicol, polivinilpirrolidona (PVP), maltodextrina, aloé barbadensis, sorbato de potássio, benzoato de sódio, PEG-40 óleo de castor hidrogenado, EDTA dissódico, cloreto de benzalcónio, hialuronato de sódio, aroma, sacarina sódica, glicirrizato dipotássico.

Advertências: O uso de Aloclair® Plus Spray está contra-indicado em pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a algum dos seus componentes.

Precauções de utilização: Não utilizar após o prazo de validade do produto ou se o frasco estiver danificado. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Evitar o contacto com os olhos. Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar directa.

Conteúdo: 15 ml

Aloclair® é uma marca registada de Sinclair Pharmaceuticals Limited.

CE0477

Fabricante:
Sinclair Pharma Srl
Viale Restelli 29
20124 Milão, Itália

Distribuído por:
Jaba Recordati, S.A.
Lagoas Park, Ed. 5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo, Portugal